

■ WAR-01 (Blu-ray/DVD system)主な仕様

BD/DVD	
記録方式	MPEG-4 AVC/H264、MPEG-2 TS、MPEG-2 PS
記録可能外部入力	HDV/DV(i.Link)入力、Sビデオ入力、ビデオ入力
専用記録メディア	
Blu-ray	BD-RE (Baby's memorial Album)
DVD	DVD-RW (Baby's memorial Album)
外部入出力端子	
ビデオ入出力	1.0V(p-p)、75Ω (BNC)
DV 入力	4ピン、HDV/DV(i.Link)
音声入出力	2Vrms、10kΩ(ピンジャック)
Sビデオ入出力	Y:1.0V(p-p)、75Ω、C:0.286V(p-p)、75Ω(4ピン)
コンポーネント出力	Y:1.0V(p-p)、75Ω(BNC)、CB/CR : 0.7V(p-p)、75Ω(BNC)
HDMI 出力	19ピン Aタイプ(Deep Color、x.v.Color)

■コントローラ (タブレットパソコン)



■録画機 (Blu-ray/DVDレコーダー)



■付属品

- ◎タブレットPC専用クレードル 1台
- ◎USBキャプチャケーブル 1本
- ◎シリアルケーブル 1本
- ◎音声ケーブル 1本
- ◎リモコン (レコーダー用) 1本
- ◎映像ケーブル (RCA) 1本
- ◎各種専用プラグ

■専用DVD/Blu-rayディスク (Baby's memorial Album)

- ◎使用ディスク
DVD : DVD-RW
Blu-ray : BD-RE

- ◎オリジナルDVD/Blu-rayディスク
※PR動画を収録したオリジナルディスク
※ジャケット、ケースデザインも可能

- ◎動画製作
ディスクに収録するPR動画は、撮影
編集し弊社が製作いたします



※写真はBlu-rayディスクです

■周辺機器 (別売り)

- ◎各種ケーブル
- ◎スキャンコンバーターなど



Baby's memorial album
ALrec system
かんたんビデオ録画システム



WAR-01
Blu-ray Disc DVD





“子育てで悩んだとき、あのときの気持ちを思い出してほしい”
お腹の赤ちゃんの貴重なエコー映像や
産後の赤ちゃんの初めての沐浴授乳のビデオは
医院様からの特別な贈りものです。



ただ、エコー映像や産後のビデオを録画するのではなく
BGMやナレーションで編集したようなメモリアルアルバムを
その場で作成できます。

ディスクの先頭部分には、クリニックPR動画が予め収録されて
おりますので、患者様の口コにも効果をあげています。

この時期には胎動が
わかるようになります。
胎動は“元気してるよ”という
赤ちゃんからのサインです。
髪の毛や、産毛が生え
爪も生えはじめます。

あなたはたくさんの愛に支えられて
誕生したのです。
あなたの産声がお母さんの気持ちをどんなに癒して
くれたことでしょう。……

エコー映像 初期	エコー映像 中期	シーン① 沐浴シーン	シーン② 授乳シーン
-------------	-------------	---------------	---------------

- 設定の一例 ※ディスクの先頭部分にはクリニックPR動画が収録されます。
- BGMやナレーションの他に現場の音声も収録可能です。

【コントローラ部画面】

- 【映像出力画面】
入力映像が表示されます。
- 【番号ボタン】
例
1 ①12週～18週（初期）60秒
2 ②19週～25週（中期）90秒
3 ③26週～35週（後期）120秒
※録画時間は任意で設定可能です。
※BGMのみにも設定可能です。
※最大で10シーンまで設定可能です。
※フリーボタンを使用した場合は何回でも録画できますが
BGM・ナレーションを設定することはできません
- 【録画ボタン】
録画を開始します。
※予め設定した時間で自動停止します。
※フットスイッチにも連動しています。
- 【状態表示】 現在のメディア種別、録画時間ゲージなど録画状況を表示します。

【3ステップのかんたん操作】※Blu-rayディスクへの書き込みの場合

- ①ディスクをセット
(ディスク認識に約10秒かかります)
- ②シーンを選択して録画スタート！
※自動で停止します
- ③ディスクを取り出し完了です

【システムについて】

- ※Blu-ray、DVDへの録画操作は共通です。
- ※ご使用の超音波機器によりコンバーターなどの周辺機器が別途必要になる場合があります。

【専用ディスク「Baby's memorial Album」について】

- ※Blu-rayディスクはファイナライズ不要です。
- ※DVDはファイナライズ操作が必要になります。DVDのファイナライズ実行に約50秒、解除に約20秒かかります。
- ※市販のディスクは使用できません。

【クリニックPR動画について】

- ※クリニック様オリジナルのプロモーションビデオを製作いたします。ビデオ撮影から編集まで弊社にて行っております。
- ※お手持ちの写真素材などでも製作可能です。

“こんなときは”【安心のデータ修復サポート】

Baby's memorial Albumは弊社で再編集が可能です。
汚れやキズによる書き込みエラーなどのディスクを修復するサービスを行っております。
弊社にお送りいただければ、正常なディスクに再編集してご返送させていただきます。
※修復が出来ない場合や、有償になることがあります。

